



Ambu 

Ideas that work for life

Ambu® **Blue Sensor NEO X** **Electrodos Neonatales de ECG**

**Sencillamente
Extraordinario**



Rendimiento extraordinario

Los electrodos neonatales de Ambu para ECG han sido especialmente diseñados para bebés prematuros. Garantizan una excelente adhesión y una señal fiable, incluso cuando se utilizan en incubadoras con alta humedad.

La combinación del gel único y la forma de mariposa, que se adhiere suavemente a los contornos de un bebé, significa que el NEO X puede permanecer adherido durante largos períodos de tiempo.

Extraordinariamente suave

El electrodo Blue Sensor NEO X es muy fácil de colocar, hasta dentro de la incubadora, debido a su peculiar sistema de colocación con lengüetas "sin contacto".

La adhesión fuerte reduce el riesgo de falsas alarmas. Además ofrece a los bebés comodidad óptima en la piel y el alivio del estrés debido a la manipulación innecesaria.

La forma de mariposa transparente se adhiere suavemente y con firmeza a la piel, se adapta a los contornos del cuerpo y permite la inspección fácil de la piel.





Beneficios para las enfermeras y los bebés

- Forma de mariposa: el electrodo puede adaptarse a los contornos del bebé, contribuyendo a una adherencia excelente
- Material transparente: permite una inspección fácil de la piel
- Tamaño pequeño: el electrodo puede ser utilizado incluso en los pacientes más pequeños
- Gel especial: asegura una adherencia a largo plazo
- Sistema de colocación: las lengüetas permiten una colocación rápida y sencilla, sin tocar el gel adhesivo
- Radiotranslúcido: los electrodos no tienen que ser retirados al realizar radiografías
- Cables de colores para una fácil identificación




Ahorro extraordinario utilizando NEO X

Con el electrodo Blue Sensor NEO X su servicio puede optimizar recursos y reducir costes.

El gráfico muestra el ahorro al usar NEO X:

Desde el segundo día un ahorro potencial del 70% durante un mes de monitorización.*

* Comparamos con el uso tradicional de electrodos desechables de ECG, suponiendo que en promedio se quedan puestos durante 24 horas. NEO X está diseñado para permanecer colocado durante un promedio de 72 horas, en base a los resultados de pruebas de laboratorio y evaluaciones de usuario.

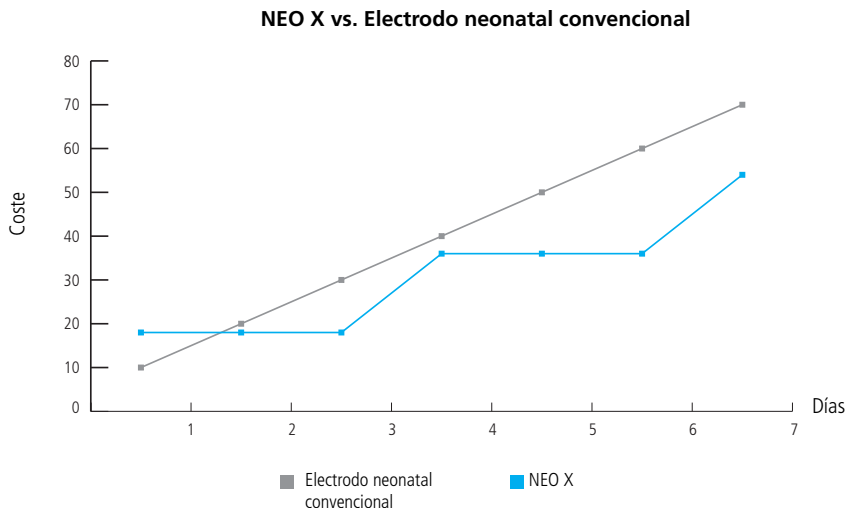

Very translucent



Ambu®

Single patient use

Blue Sensor NEOX

REF: NEOX-60-K/EU/3

2012-04

LOT

1234567

(01)05707480026166(12)120415(10)1234567

Made in Malaysia
FLC6 V01.01

Bolsa dorada de Ambu Blue Sensor NEO X

Especificaciones de pedido

Configuración disponibles para NEO X

NEO X-60-K/EU*

*EU : Cables de colores: rojo, amarillo y negro

Empaquetado estándar

Uds. / bolsa..... 3
Uds. / caja (venta mínima).....120
Uds. caja interior / caja exterior.....120/960

NEO X - 60 - K



Producto



Largo Cable (cm)




Conector



Ambu Blue Sensor NEO X


Instrucciones de uso

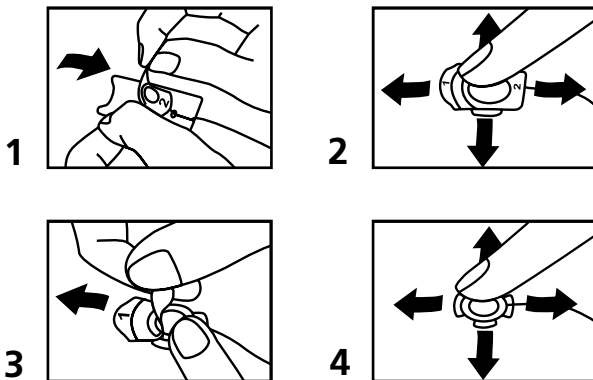

Colocación del Electrodo

Para colocar los electrodos:

1. Levantar la lengüeta blanca número 1 hacia ti para retirar el electrodo.
2. Posicionar el electrodo en la piel del paciente. Presionar delicadamente con el dedo el área adhesiva con un movimiento circular alrededor del contorno transparente.
3. Retirar la lengüeta número 2 tirando de ella hacia la parte superior del electrodo, con un ángulo de 180° (paralelo a la piel). A la vez ayudarse de la otra mano para sujetar el electrodo en el sitio correcto.
4. Presionar delicadamente cada una de las 4 hojas del electrodo para maximizar la adhesión.

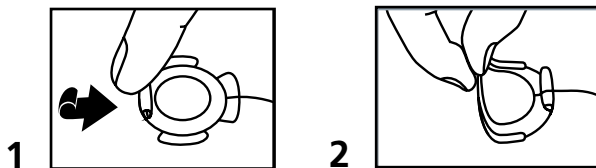

Retirar el Electrodo

Para despegar el electrodo:

1. Enrollar suavemente los bordes del electrodo hacia el centro con ayuda de los dedos.
2. Levantar el electrodo colocando el dedo entre el adhesivo y la piel del paciente.

Deshacerse de los electrodos. Los electrodos NEOX son de un solo uso.



Áreas de negocio

- Manejo Vía Aérea
- Monitorización & Diagnóstico
- Emergencias



Firma Ambu S.L

Alcalá, 261-265, Edf. 2-3º dcha.

28027 Madrid

T: (+34) 91 411 68 30

F: (+34) 91 564 50 82

www.ambu.es