

HOJA TÉCNICA


Ambu WhiteSensor 40556, pequeño y radiotransparente, se ha diseñado especialmente para bebés y recién nacidos. El electrodo dispone de un gel sólido suave con la piel que garantiza una calidad de señal óptima durante la monitorización y también permite repositonarlo si es preciso. El electrodo es cómodo de llevar, incluso durante periodos largos, gracias al material suave del tejido.

Características Principales


- Gel sólido suave con la piel
- Respaldo tejido suave transpirable
- Tamaño pequeño ideal para neonatos
- Radiotransparente
- Cable integrado con conector de 4 mm

Ambu® WhiteSensor 40556

Electrodo desechable
para ECG

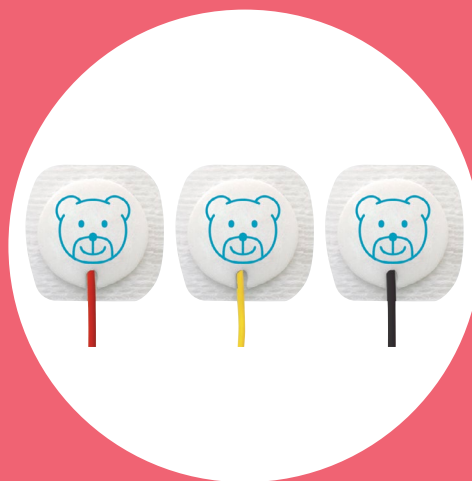

Gel sólido

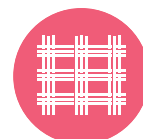

Respaldo
de tejido



Radiotransparente

WhiteSensor

Ambu

ESPECIFICACIONES

Dimensiones

Tamaño del electrodo (largo × ancho en mm)	22 × 22
Tamaño de contacto con la piel (en mm ²)	484
Altura sin el conector (en mm)	2,8

Sensor

Material del sensor	Plata, cloruro de plata (Ag/AgCl)
Sistema de gel	Base de cloruro, gel bioadhesivo
Área del gel (en mm ²)	484
Área del sensor (en mm ²)	89

Datos eléctricos (ANSI/AAMI)

Impedancia de CA - típica	256 Ω
Potencial de desviación de CD - típica	0,6 mV
Recuperación de sobrecarga de desfibrilación - típica	13 mV
Tasa de cambio para potencial de polarización - típica	- 0,3 mV/s
Inestabilidad de desviación combinada y ruido interno	2,2 μV
Tolerancia de corriente de polarización	9,4 mV

MATERIALES

Electrodo

Biocompatible	Sí
Material del respaldo	Tejido sin tejer
Etiqueta de soporte	Espuma de polietileno impreso (PE)
Cable	Fibras de carbono de 600 mm con aislamiento de PVC
Conector	Hembra de 4 mm
Protector antiadherente	Poliéster siliconado

Embalaje

Bolsa (capas exterior/central/interior)	Papel/polietileno (PE)/aluminio/polietileno (PE)
Caja interior	Cartón ondulado impreso
Caja de envío	Cartón ondulado impreso

Medio ambiente

PVC en el electrodo	No
Aislamiento del cable	PVC sanitario sin ftalatos
Látex	No
PVC en el embalaje	No

Radiografía y resonancia magnética

Radiotransparente	Sí
Compatible con resonancia magnética	No

Vida útil

Bolsa abierta	Información disponible previa solicitud
Bolsa sellada*	24 meses

*A partir de la fecha de fabricación

Embalaje estándar

Cantidad/bolsa	3
Cantidad/caja	300
Venta mínima	3000

Atención

Un único uso

ESPECIFICACIONES PARA PEDIDO

Ref.	Unidades/blíster	Unidades/bolsa	Unidades/caja interior	Unidades/caja exterior
40556	3	3	300	3000

Ambu

Firma Ambu SL

C. Santa Leonor, 65
Bloque B, Planta Baja, derecha
Madrid, 28037, Spain
T +34 91 411 6830
www.ambu.es
ayuda@ambu.com



EE. UU.: solo con receta.